



Verwenden Sie das Tens – Gerät N604 ausschließlich laut Angabe des Arztes

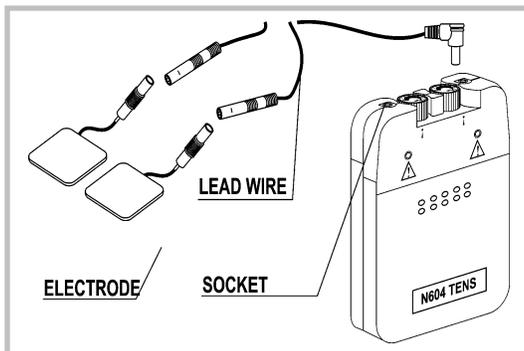

1. Elektrodenkabel an das Gerät anschließen:

Verbinden Sie das Elektrodenkabel mit dem Gerät. Hiefür gibt es zwei Anschlussbuchsen, es ist gleichwertig, welche Sie wählen, wichtig ist, dass der Stecker fest am Gerät befestigt ist.

2. Verbinden Sie die Elektrodenkabel mit der Klebelektrode.

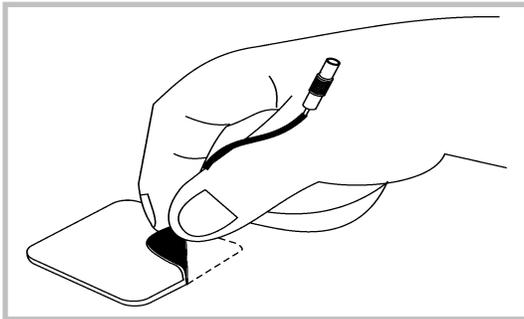

3. Plazieren Sie die Elektroden laut Anweisung der Ärztin/Arztes auf der Körperstelle.

Hiefür nehmen Sie bitte die Elektroden von der schützenden Zwischenlage (siehe Abbildung).

Die Klebefähigkeit wird mit dem Erreichen der Hauttemperatur erhöht.

Regelung der Intensität: Durch das Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn (linker oder rechter Drehknopf- je nachdem, wo Sie das Kabel angeschlossen haben) wird das Gerät eingeschaltet und die Intensität erhöht. Die Impulsanzeige beginnt in Abhängigkeit des Stromflusses (Frequenz) zu blinken. Die Frequenz wurde für Sie voreingestellt. Die Intensität soll so eingestellt werden, dass Sie ein Kribbeln spüren. Hier ist den Anweisungen der Ärztin/Arzt zu folgen.

4. Nach Gebrauch: Aufbewahren der Elektroden

Zwischen den Anwendungen sollen die Elektroden wieder auf die Zwischenlage (durchsichtige Folie) gegeben werden und in dem wiederverschließbaren Beutel bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Die Haftfähigkeit der Elektroden kann durch Abspülen mit lauwarmem Wasser verlängert werden.

Tipp: Nach Beendigung der Behandlung können die Elektrodenkabel am Gerät sowie an den Elektroden angesteckt bleiben.