

3.4 Wichtige Anwendungs- und Sicherheitshinweise



Achtung!

Die Anwendungs- und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt einzuhalten. Das Gerät ist nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Anwendungen einzusetzen.

- Bei Patienten mit implantiertem elektronischen Gerät erst nach Abklärung der Risikolosigkeit eine HiToP®-Therapie durchführen.
- Handys und Funktelefone ausschalten, oder in 2 - 3 m Abstand vom Gerät ablegen.
- Herzschrittmacher können gravierend gestört werden. Die Therapie sollte in diesen Fällen nur unter kontinuierlicher Puls- und EKG-Überwachung durchgeführt werden.
- Befinden sich der Patient und/oder das Patienten-kabel im unmittelbaren Bereich eines Hochfrequenz-, Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegerätes ist eine Beschädigung des Gerätes oder Schädigung des Patienten nicht auszuschließen. Bitte einen Abstand von mindestens 3 m einhalten.
- Ein gleichzeitiger Anschluß des Patienten an ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät kann Verbrennungen unter den Reizstromelektroden zur Folge haben.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt. Wird mit ihm in Anaesthesieräumen im gefährdeten Bereich gearbeitet, so ist die Möglichkeit einer Explosion nicht auszuschließen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Badens.
- Bringen Sie die Elektroden nur an den Körperbereichen an, die in der Bedienungsanleitung vorgegeben sind.
- Verbinden Sie nie andere Personen mit den Elektroden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Bei allen erkennbaren Betriebsstörungen setzen Sie sich umgehend mit gbo Medizintechnik AG oder einer von gbo Medizintechnik AG autorisierten Servicestelle in Verbindung.