



Fußanlage mit
Standardzubehör

HiToP 191 - Erweiterung: Fußanlage mit großen Elektroden

Zur Polyneuropathiebehandlung bei Gefühlsstörungen in den Füßen und bei Gangunsicherheit, zur flächigen Auflage der Fuß-Außenränder.

1. Klettbänder auf den Boden legen.
2. Die schwarze Seite der Elektroden einsprühen und mit der grauen Seite nach unten auf die Klettbänder legen.
3. Die sauberen, nicht eingecremten Füße auf die Elektroden stellen und mit den Klettbändern fixieren.
4. Die mit dem Gerät ausgelieferten easyfix-Elektroden auf der schwarzen Seite einsprühen und an den Waden fixieren.
5. Elektrodenkabel (rot) anstecken:
Fußsohlen: schwarze Stecker
Wade: weiße Stecker
6. Gerät einschalten, und die Intensität bis zu einem angenehmen Kribbeln erhöhen. *) Je nach Wunsch die Beine hochlagern oder bequem hinsetzen, entspannen.



Neu für die Sohle.
Die Elektroden für die Wade
verwenden Sie weiter wie bisher.



Therapieempfehlung: 30-60 Minuten ergänzend zur Oberschenkelanlage, bis zu sieben Mal die Woche.

*) Auch wenn Sie bei der Fußanlage am zweiten Fuß nichts spüren oder nicht sicher sind, ob Sie etwas spüren: Der Stoffwechsel und die Ernährung der Nerven und des Gewebes wird angeregt. Tipp: Nach der Behandlung nicht sofort aufstehen.

Metallteile im Körper sind keine Kontraindikation.
Bei Herzschrittmacher immer ein Bein nach dem anderen behandeln, nicht gleichzeitig.

