



RASCHER
WIEDER FIT

HEIMTHERAPIE mit Mietgeräten



- für Nachhaltigkeit in der Rehabilitation
- ohne Nebenwirkungen
- rasche Hilfe bei Muskelschwäche, Schmerzen und Lähmungen



ALLE GERÄTE
EINFACH
ANZUWENDEN

INHALTSVERZEICHNIS

Unser Service für Patienten

Technische Kompetenz	3
Medizinische Kompetenz	3

Einsatzgebiete, Indikationen und Beschreibung der Geräte

Elektrostimulation innervierter Muskeln	4
Elektrostimulation denervierter Muskeln	4
Effekte der Elektrostimulation	5
Stimulation innervierter und denervierter Muskeln mit der STIMULETTE	6
Therapie akuter und chronischer Schmerzen	7
Hilfe bei Polyneuropathie: HiToP – Hochtontherapie	7
Arthrosen, Ganzkörperschmerzen, MS: HiToP Metabol	7

Die kleinen Helfer

TENS N604	8
SwiSto Leitungswasser-Iontophorese, NeuroTrac-MyoPlus4 Pro	8
Sonostat 133, TQ-Solo	9
Apparative intermittierende Kompression: Lympha-mat gradient	10

Verordnung

Elektrostimulation für die Heimtherapie	11
Orientierungshilfe nach Dr. Biowski	11
Kostenübernahme für Mietgeräte	12

Wir informieren Sie weiter

Webinare und Online-Fortbildungsangebote	13
Neue Trends - Telerehabilitation und Nachhaltigkeit	13
Privatmiete	14

Wie komme ich zu meinem Gerät?

Hinweise für Verordner	15
Hinweise für die Patienten	15
Kontakt und Lageplan	15
Öffnungszeiten	15

EINE SÄULE DER
MULTIMODALEN
SCHMERZ-
THERAPIE

Seit mehr als 70 Jahren bieten wir Elektrotherapie für zu Hause an und entwickeln sie weiter. Sie ist eine wichtige Säule in nachhaltigen Behandlungskonzepten.





Mag. Gudrun Schuhfried

Dr. Peter Biowski

Unser Service für Ihre Patienten - Heimtherapie mit Mietgeräten

Heimtherapie ermöglicht Ihren Patienten eine intensive Therapie: effektiv, jederzeit verfügbar, komfortabel, kostengünstig und zeitsparend. Sie ist eine einfach anzuwendende, sichere und nachhaltige Therapie. Die Behandlung zu Hause kann nach ärztlicher Verordnung und Einschulung durch uns oder den Arzt /Therapeuten problemlos durchgeführt werden.

Haupteinsatzgebiete sind Schmerztherapie, Muskelstimulation bei zentralen und peripheren Paresen und Muskelinsuffizienz, die Behandlung von Hyperhidrosis, Inkontinenz, des Lymphödems und von Polyneuropathie.

Die Therapiedaten der STIMULETTEN, des NeuroTracs und der Hochtontherapiegeräte sind auslesbar und damit sind die Geräte geeignet zur Telerehabilitation.

Rasch wieder fit

Heimtherapie kann bei freier Zeiteinteilung täglich mit individueller Therapiedauer durchgeführt werden und zeigt daher besonders rasche Heilungserfolge! Zahlreiche Studien untermauern dies. Profitieren Sie von unserer technischen und medizinischen Kompetenz in dritter Generation:

► Technische Kompetenz

Ihren Patienten stehen professionelle, leistungsstarke, von unseren Technikern regelmäßig überprüfte und gewartete, den höchsten Sicherheitsstandards entsprechende Therapiegeräte für die Heimtherapie zur Verfügung.

► Medizinische Kompetenz

Dr. Peter Biowski, Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation, kann mit Ihnen die für Ihre Patienten optimale Therapieform, -dosierung und -dauer erstellen.

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Überblick über unser Gerätesortiment, Einsatzgebiete und Indikationen sowie die Kosten und die Abrechnungsmöglichkeiten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Ihr Heimtherapie-Team der Schuhfried Medizintechnik

EINSATZGEBIETE, INDIKATIONEN UND BESCHREIBUNG DER GERÄTE

Elektrostimulation innervierter Muskeln mit der STIMULETTE

Biphasischer Schwellstrom aS stellt die ideale Therapiemöglichkeit dar, innervierte Muskeln zu kräftigen bzw. zu erhalten. Bei Gelenksproblemen sollten immer auch die das Gelenk stabilisierenden Muskeln gekräftigt werden. Bei der Gonarthrose oder dem Zustand nach ASK oder K-TEP ist eine Stimulation des M. quadriceps und/oder der gesamten Oberschenkelmuskulatur wichtig. Auch bei sturzgefährdeten Patienten ist die Elektrostimulation, die das aktive Training ergänzt, sinnvoll. Schwellstrom kann auch bei zentralen Paresen eingesetzt werden.

Die Therapiedauer kann bis zu 30 Minuten pro Tag betragen und sollte mit deutlichen Muskelkontraktionen (mit /ohne Mitarbeit) durchgeführt werden.

Elektrostimulation denervierter Muskeln mit der STIMULETTE

Bei peripheren Paresen kommt es neben der Atrophie auch zur Dystrophie der von der Nervenläsion betroffenen Muskeln.

Durch die regelmäßige Anwendung von biphasischem Exponentialstrom (E100 oder 200 ms) ist ein gewisser „konservierender Effekt“ zu erzielen. Die Stimulation mit individuell programmierbaren biphasischen Rechteckimpulsen in Form von Einzelzuckungen sind auf der STIMULETTE S2x als DEN120 schon voreingestellt (60 ms Impulsbreite, 400 ms Impulspause = ~2 Hz; 10 s on 1 s off) und mit tetanischen Kontraktionen, voreingestellt als DEN40 (20 ms Impulsbreite, 20 ms Impulspause = ~20 Hz; 5 s on 2 s off), bringt durch die massiv gesteigerte Impulsanzahl eine Wiederherstellung der Zellstrukturen, Verbesserung der Durchblutung und der Trophik.

Je früher nach erfolgter Denervation mit der Behandlung begonnen wird, umso besser sind die Effekte auf die Muskulatur. Die Therapie sollte am besten täglich und mit einer Stimulationszeit von bis zu 30 Minuten durchgeführt werden.



GESICHERTER
HEIMTHERAPIE-
MODUS




Bis der Nerv nach einer Läsion nachgewachsen ist, kann das zwei Jahre dauern. Elektrostimulation erhält den Muskel in dieser Zeit.

Auch altersbedingt atrophisierte Muskulatur lässt sich stimulieren. Aktuelle Studie: Kern H, Hofer C, Löffler S, et al. Atrophy, ultra-structural disorders, severe atrophy and degeneration of denervated human muscle in SCI and Aging. Implications for their recovery by Functional Electrical Stimulation, updated 2017. Neurol Res 2017;39:660-6.

Effekte der Elektrostimulation denervierter Muskeln

Strukturveränderungen (Muskelgewebe ist rot dargestellt) durch Elektrostimulation bei verschiedenen Patienten mit komplett denervierten Muskeln mit Denervationszeiten von 0,8 bis 5,4 Jahren vor- (A – E) und nach zwei Jahren (Foto F – J) Elektrostimulation

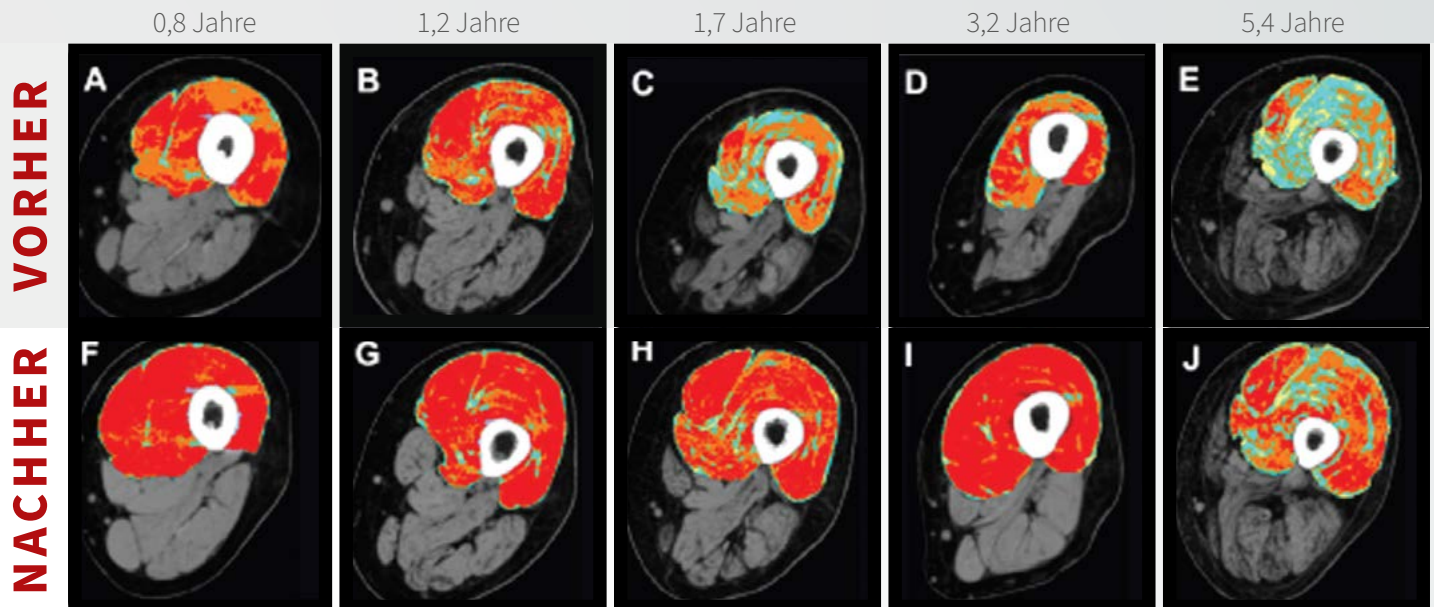

Bilddokumentation aus dem EU-Projekt RISE, siehe Kern, Neurorehabilitation and Neural Repair 2010: Elektrostimulation stellt eine sichere, wirksame und gleichzeitig auch die einzige Therapie denervierter Muskulatur dar – möglich durch viele breite Impulse und hohe Intensität.

Beispiele für Stimulation denervierter Muskeln in der Heimtherapie



Axillarisparese



Radialisparese



Stimmbandlähmung



Stimulation innervierter und denervierter Muskeln mit der STIMULETTE

Stimulation innervierter Muskulatur mit:

Schwellströme aS aSN aSL

HV60*, aSMF (russischer Stimulation oder Kots-Strom)*

Stimulation denervierter Muskulatur mit:

E100, E200, DEN120*, DEN40*

Individuell programmierbaren Stromformen*

Add-On: Ströme für spezielle Schmerztherapie

IG50, TENS, UR (Träbert), HV100*, MF100*

* nur mit STIMULETTE S2x möglich

Angenehm für den Patienten:

alle Impulsstromformen (ausgenommen DIAD) sind biphasisch/metallkompatibel möglich.

Passworteingabe

Sicher und leicht zu merken: Nur der freigegebene Strom kann verwendet werden, das Passwort legt der Behandler mit dem Patienten fest.



Einfach mitzunehmen in der praktischen Tasche.

ZUVERLÄSSIG UND SELBSTERKLÄREN



STIMULETTE Sx



STIMULETTE S2x

WEBINARE ZUM NACHHÖREN - HIER GEHT'S ZUR REGISTRIERUNG


SCAN ME!



Weiter verfügbare Modelle:

STIMULETTE rx,
STIMULETTE r2x


PNP
URSÄCHLICH
BEHANDELN

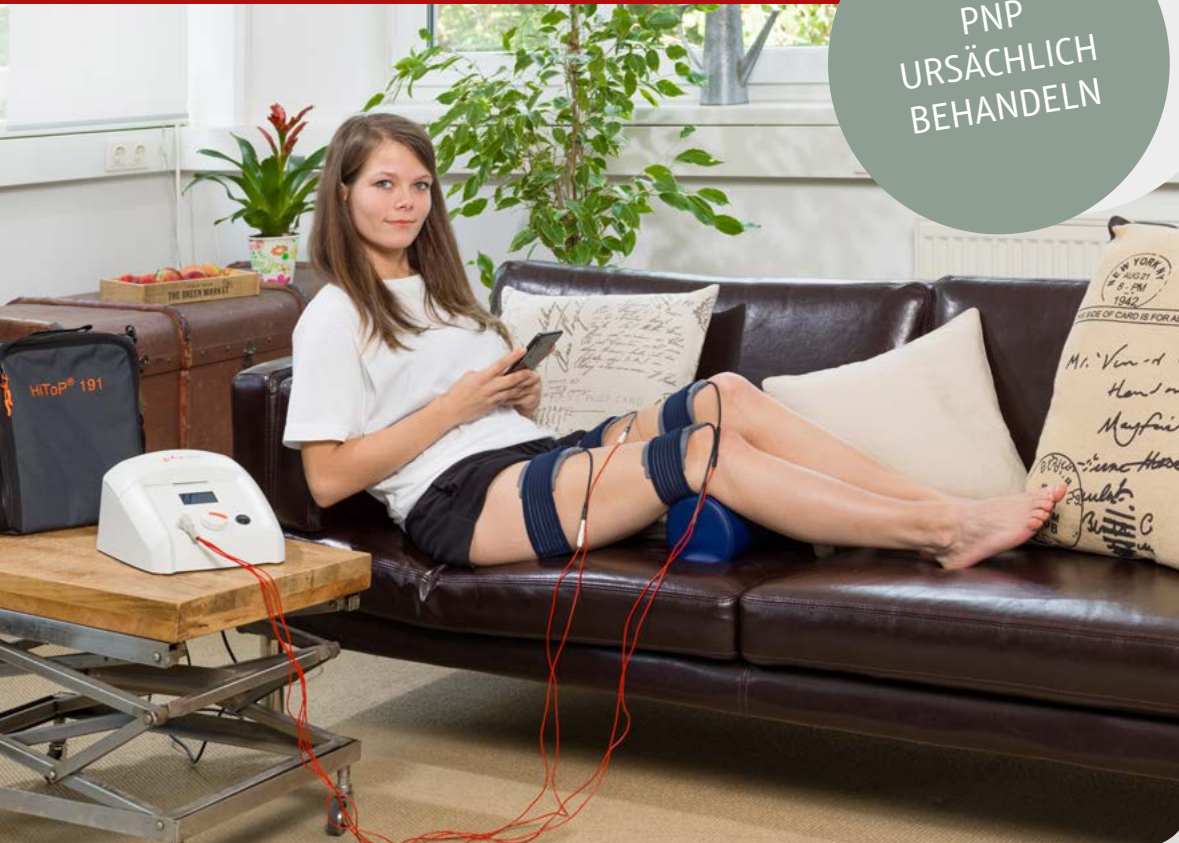

SCAN ME!



Die Hochtontherapie beeinflusst direkt den Nervenstoffwechsel. Die Mitochondrien (rot) werden vergrößert.

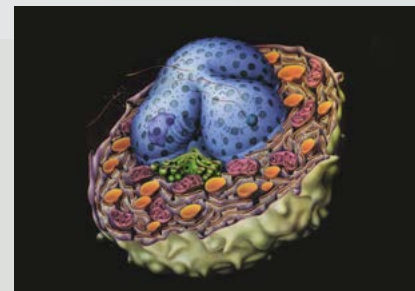

HiToP Metabol

Therapie akuter und chronischer Schmerzen

HiToP 191/PNP – Hochtontherapie

Hilfe bei Polyneuropathie (PNP, CIPN, Diabetes)

Das besondere dieser Stromform ist eine stufenweise Veränderung der Frequenz von 4000 Hz bis zu 33000 Hz bei gleichzeitig modulierter Stromstärke.

In den Leitlinien der Österreichischen Schmerzgesellschaft zur Behandlung der diabetischen PNP (75 % Erfolgsrate lt. Studien) wird diese Methode mit Evidenz IIa bewertet. Es handelt sich um eine ursächlich wirkende und nicht um eine symptomatische, verdeckende Therapie wie z.B. TENS. Bei der Stimulation des Oberschenkels wird zusätzlich moderater Muskelaufbau erzielt.

Die Hochtontherapie beeinflusst direkt den Nervenstoffwechsel, sie kann auch vorbeugend eingesetzt werden. Bei Rückgang der oft quälenden Symptome ist nach ärztlicher Rücksprache oft auch eine Reduktion der Medikamentendosis möglich.

HiToP Metabol

Arthrosen, Ganzkörperschmerzen, Multiple Sklerose, spastische Paresen

Für diese Heimtherapie wird das Gerät HiToP Metabol verwendet. Die angewendete Stromform ist SimulFAMi, die gleichzeitige Modulation von Frequenz und Intensität.

Patienten empfinden Hochtontherapie durchwegs als äußerst angenehm und haben nicht das für Elektrotherapie typische Stromgefühl.



Die kleinen Helfer



TENS N604

TENS N604

Bei akuten und chronischen Schmerzen

2 Kanal Batteriegerät zur Therapie akuter und chronischer Schmerzen, z.B. Gelenkschmerzen, Wirbelsäulenschmerzen, Nervenschmerzen, Phantomschmerzen.



SwiSto

SwiSto Leitungswasser-Iontophorese-Gerät

Abhilfe bei Hyperhidrosis an Händen und Füßen

ermöglicht eine leicht anwendbare Therapie bei erhöhter Schweißbildung an Füßen, Händen und Achselhöhlen. Metallteile und elektronische Implantate im Behandlungsbereich stellen eine Kontraindikation dar!



NeuroTrac-MyoPlus4 Pro

NeuroTrac-MyoPlus4 Pro

Heimbehandlung bei Inkontinenz und nach Schlaganfall

Das Gerät bietet eine Kombination aus EMG-Biofeedback und Elektrostimulation. Schwellenwerttraining mit EMG getriggerte Stimulation bedeutet, dass die Stimulation durch Überschreiten der voreingestellten Schwelle ausgelöst wird. Es wird z.B. in der Inkontinenztherapie, bei zentralen Paresen und in der Rehabilitation nach Schlaganfällen eingesetzt.

Sonostat 133

Ultraschalltherapie bei Erkrankungen des Bewegungsapparates

Das Ultraschalltherapiegerät Sonostat 133 ist durch seine mechanische, thermische, chemische und biologische Wirkung erfolgreich einzusetzen bei: entzündlichen, rheumatischen und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates, Tendopathien, traumatischen Affektionen nach Kontusionen, Distorsionen, bei Kontrakturen und Keloidnarben. Auch als subaqualer Ultraschall anwendbar z.B. bei Fingerpolyarthrosen.



Sonostat 133

TQ-Solo

LASER-Rotlicht-Infrarotbehandlung bei Wunden und entzündlichen Prozessen


basiert auf der innovativen Multiradiance-Technologie. 640 nm gepulstes rotes Licht, 875 nm gepulstes Infrarotlicht und 905 nm supergepulster Laser werden kombiniert. Mit dem akkubetriebenen TQ-Solo Gerät können Tendopathien, Wirbelsäulenschmerzsyndrome, Gelenksverletzungen, Überlastungssyndrome, Sportverletzungen und Wunden behandelt werden.



TQ-Solo

NUR
WENIGE MINUTEN
BEHANDELN - SEHR
GUTE ERFOLGE



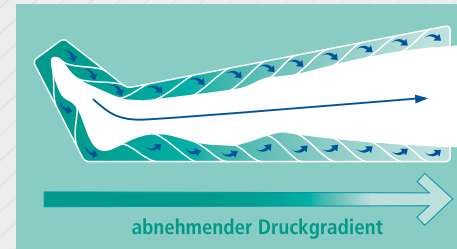

- *gradienter Druck nach proximal abnehmend*
- *überlappende Luftkammern*



Apparative intermittierende Kompression

Lympha-mat gradient

Der Lympha-mat ist ein druckgesteuertes System und arbeitet mit 12 überlappenden Luftkammern, hat ein physiologisches Druckgefälle und berücksichtigt die Flussrichtung der Lymphe. Die Verordnung einer Arm- oder Beinmanschette ist ebenso möglich wie die einer 24-Kammer-Kompressionshose.

Für die Patienten stellt dies eine unkomplizierte und effektive Art der Heimtherapie dar. Speziell beim primären und sekundären Lymphödem, beim Lipödem und bei venös bedingten Ödemen erfährt der Patient rasche Linderung. Bei kardial bedingten Ödemen kontraindiziert!

WEBINARE ZUM
NACHHÖREN -
HIER GEHT'S ZUR
REGISTRIERUNG

SCAN ME!



Diagnose: Lipödem/Lymphödem

Verordnung: Lympha-mat 300 gradient 12-Kammersystem
Wir ersuchen um Kontaktaufnahme, um die Versorgung durchführen zu können.

Die Verordnung kann für bis zu 3 Monate ausgestellt werden und mit einem weiteren fachärztlichen Verordnungsschein um 3 Monate verlängert werden.



Kostenübernahme für Mietgeräte	ÖGK	SVS	BVAEB	KFA
STIMULETTE ¹⁾ <i>Stimulation innervierter und denervierter Muskulatur, spezielle Schmerztherapie</i>	✓	✓	✓	✓
TENS N604 <i>Batteriebetriebenes Gerät zur Schmerztherapie</i>	✓	✓ ¹⁾	✓	✓
NeuroTrac MyoPlus4 Pro ¹⁾ <i>Elektrostimulation mit Schwellenwerttraining, z.B. zur Inkontinenz-Therapie, bei zentralen und peripheren Paresen</i>		✓	✓ ³⁾	
Sonostat 133 Ultraschalltherapie-Gerät ¹⁾ <i>bei Tendopathien, entzündlichen, rheumatischen und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates, traumatischen Affektionen nach Kontusionen, Distorsionen, Kontrakturen</i>		✓		
SwiSto ¹⁾ <i>Iontophorese-Gerät für die Behandlung der Hyperhidrosis</i>		✓	✓	
TQ-Solo <i>Multiradiance-Technologie (rotes Licht, Infrarot und Laser), entzündungshemmend und schmerzlindernd, leichtes akkubetriebenes Gerät</i>				
HiToP 191/PNP ¹⁾ <i>Elektrostimulationsgerät zur ursächlichen Behandlung von Neuropathie/PNP/CIPN</i>				
HiToP Metabol ¹⁾ <i>zur Behandlung von Multipler Sklerose, Spasmen, Ganzkörperschmerzen, Arthrosen</i>				
lympa-mat ¹⁾ <i>Hilfe bei Lymphödem</i>	✓ ²⁾	✓		✓

1) Verordnung nur durch den Facharzt

2) bitte um Kontaktaufnahme

3) in Einzelfällen, Einreichung durch Patient

WIR INFORMIEREN SIE WEITER!

Webinare und Online-Fortbildungsangebote

Telerehabilitation und Elektrotherapie • wirksame Behandlung von zentralen und peripheren Paresen • Schmerzbehandlung - das multimodale Behandlungskonzept • Lähmungserscheinungen und Muskelaufbau



NEUE TRENDS - WAS IST EIGENTLICH?

Telerehabilitation

ist „Rehabilitation aus der Ferne“, wobei auf moderne Informations- und Kommunikationstechnologie als Übermittlungsinstrument zurückgegriffen wird.

Studien untermauern: Das Einsetzen einer physikalischen, elektrotherapeutischen Behandlung zu Hause – vom Arzt als rehabilitative Maßnahme aus der Ferne eingesetzt – steigert die Wirkung um ein Vielfaches: Therapien zum Muskelaufbau und zur Lähmungsbehandlung leben von der häufigen, wiederholten Anwendung. Telerehabilitation ist eine große Chance! Die Vorteile sind Zeitersparnis, Stärkung der Selbstverantwortung und Motivation, mögliche Behandlungslücken können geschlossen werden.

Wichtig ist die fachärztliche Verordnung, Geräte, die zur sicheren Anwendung zu Hause konzipiert sind und die die begleitende Kontrolle wichtiger Parameter ermöglichen, zum Beispiel durch die Auslesung der Behandlungsdauer und Anlagequalität. Auch die Kombination mit einem online-Schmerztagebuch, einer Health System Watch oder Biofeedback ist möglich.

Multimodale Schmerztherapie

bindet Maßnahmen der physikalischen Medizin, also auch die Elektrotherapie, in die Schmerzbehandlung ein. Sie wird von der Österreichischen Schmerzgesellschaft – einem Zusammenschluss aus Fachärzten und Fachärztinnen aller Fachrichtungen, im Vorstand vertreten Neurologie, Physikalische Medizin und Anästhesie – empfohlen. Der Anspruch ist, medikamentösen Maßnahmen wirksame und nebenwirkungsfreie Säulen hinzuzufügen. In den USA gelten die physikalischen Maßnahmen bereits als First-Line-Therapie bei Schmerzen.

Nachhaltigkeit in der Rehabilitation

ist ein Anspruch, der vermehrt vom Gesundheitssystem eingefordert, von Rehabilitationseinrichtungen implementiert und dokumentiert wird. Beispiel Gangsicherheit: Der Patient kann die Therapie zu Hause fortführen und den Erfolg des Rehabilitationsaufenthaltes so erhalten und steigern. Hier werden gerne die Geräte zur Heimtherapie eingesetzt, die der Patient bereits kennengelernt hat, zum Beispiel zum Muskelaufbau, zum Funktionstraining mit Schwellwert oder zur Polyneuropathiebehandlung.



WEBINARE ZUM
NACHHÖREN -
HIER GEHT'S ZUR
REGISTRIERUNG

SCAN ME!





Privatmiete

Nach medizinischer Abklärung ist auch Privatmiete möglich.

Mietgeräte	Privatmiete pro Monat
STIMULETTE <i>Stimulation innervierter und dener- vierter Muskulatur, spezielle Schmerz- therapie</i> Sx S2x	€ 135,00 € 220,00
TENS N604 ¹⁾ <i>Batteriebetriebenes Gerät zur Schmerztherapie</i> Sofortkauf: 160,50	€ 59,00
NeuroTrac MyoPlus4 Pro <i>Kombination aus TENS, Biofeedback, neuro-muskulärer Stimulation und EMG-getriggelter Stimulation z.B. zur Inkontinenz-Therapie, bei zentralen und peripheren Paresen</i>	€ 177,00
Sonostat 133 Ultraschall- therapie-Gerät <i>bei Tendopathien, entzündlichen, rheumatischen und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates, traumatischen Affektionen nach Kontu- sionen, Distorsionen, Kontrakturen</i>	€ 191,00

Mietgeräte	Privatmiete pro Monat
SwiSto 3 <i>Iontophorese-Gerät für die Behandlung der Hyperhidrosis</i> Sofortkauf 618,47	€ 113,00
TQ-Solo <i>Multiradiance-Technologie (rotes Licht, Infrarot und Laser), entzündungshem- mend und schmerzlindernd, leichtes akkubetriebenes Gerät</i>	€ 219,00
HiToP 191/PNP ¹⁾ <i>Elektrostimulationsgerät zur ursächlichen Behandlung von Neuropathie/PNP/CIPN</i> Sofortkauf: 2.350,00	€ 212,00
HiToP Metabol ¹⁾ <i>zur Behandlung von Multipler Sklero- se, Spasmen, Ganzkörperschmerzen, Arthrosen</i> Sofortkauf: 2.350,00	€ 212,00
lympa-mat 300 gradient <i>12 Kammer System inkl. einer Manschette Inkl. Hosenkombi Zusätzliche Manschette</i>	€ 219,00 € 271,00 € 42,00

1) Bis zu 3 bezahlte Monatsmieten werden angerechnet

Preise in Euro inkl. USt., Stand: Jänner 2024,
vorbehaltlich Druck- und Satzfehler



Gesamtkatalog

FORDERN
SIE UNSERE
WEITEREN
KATALOGE
AN



Liegenkatalog

WIE KOMME ICH ZU MEINEM GERÄT?

RASCHER
WIEDER
FIT

- Verordnung durch den Facharzt: Ihr Arzt hat Ihnen eine Behandlung mit hochwertigen Medizinprodukten der Firma Schuhfried für zu Hause verordnet/empfohlen und das Therapieprogramm festgelegt.
- Bitte schauen Sie, ob die Verordnung vollständig ausgefüllt ist (Name und SV-Nummer, Mitversichert/Selbstversichert, Diagnose, genaue Anlage, empfohlene Dauer, Arztstempel, Unterschrift).
- Sie rufen uns an 01/405 42 06 oder senden uns die Verordnung per Fax 01/405 44 46. Eine gesicherte Übertragung ist über www.schuhfriedmed.at via upload möglich. Einfach rechts unten auf unserer Homepage den Button "Verordnungsschein sicher hochladen" anklicken. Wir vereinbaren dann mit Ihnen die Abholung bzw. den Versand per Post und stehen Ihnen gerne beratend zu Verfügung.
- Sie bekommen von uns mit dem Gerät eine Mietvereinbarung – bitte genau durchlesen und Verordnungsdauer/Mietdauer beachten!
- Für eventuelle Verlängerungen benötigen Sie eine Folgeverordnung vom Facharzt. Nachweise des Einsatzes (Behandlungsstunden und Behandlungsdauer) werden bei einigen Geräten aufgezeichnet und ausgelesen.

VERORDNUNGSSCHEIN SICHER HOCHLADEN

Auf www.schuhfriedmed.at/heimtherapie-mit-leihgeraeten/ können Sie Ihren Verordnungsschein sicher und einfach hochladen!

VERORDNUNGSSCHEIN
SICHER
HOCHLADEN

Wir wünschen Ihnen alles Gute und rasche Genesung!


Ihr Heimtherapie-Team der Schuhfried Medizintechnik

KONTAKT UND LAGEPLAN

Dr. Schuhfried Medizintechnik
1090 Wien, Van Swieten-Gasse 10
Tel: +43/1/4054206
Fax: +43/1/4054464
Mail: info@schuhfriedmed.at
Web: www.schuhfriedmed.at

ÖFFNUNGSZEITEN


Mo - Do: 08:00 – 17:00
Fr: 08:00 – 12:00

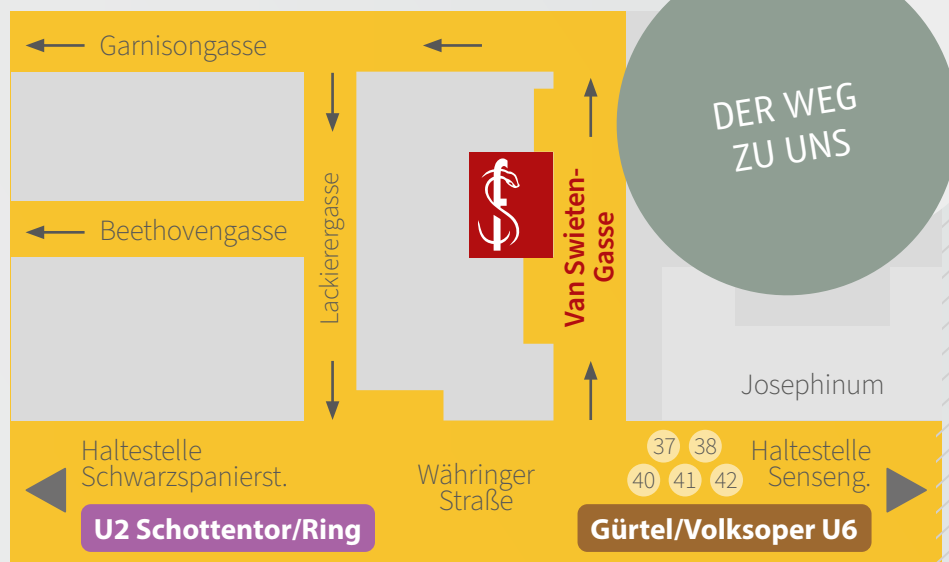

DER WEG
ZU UNS



SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

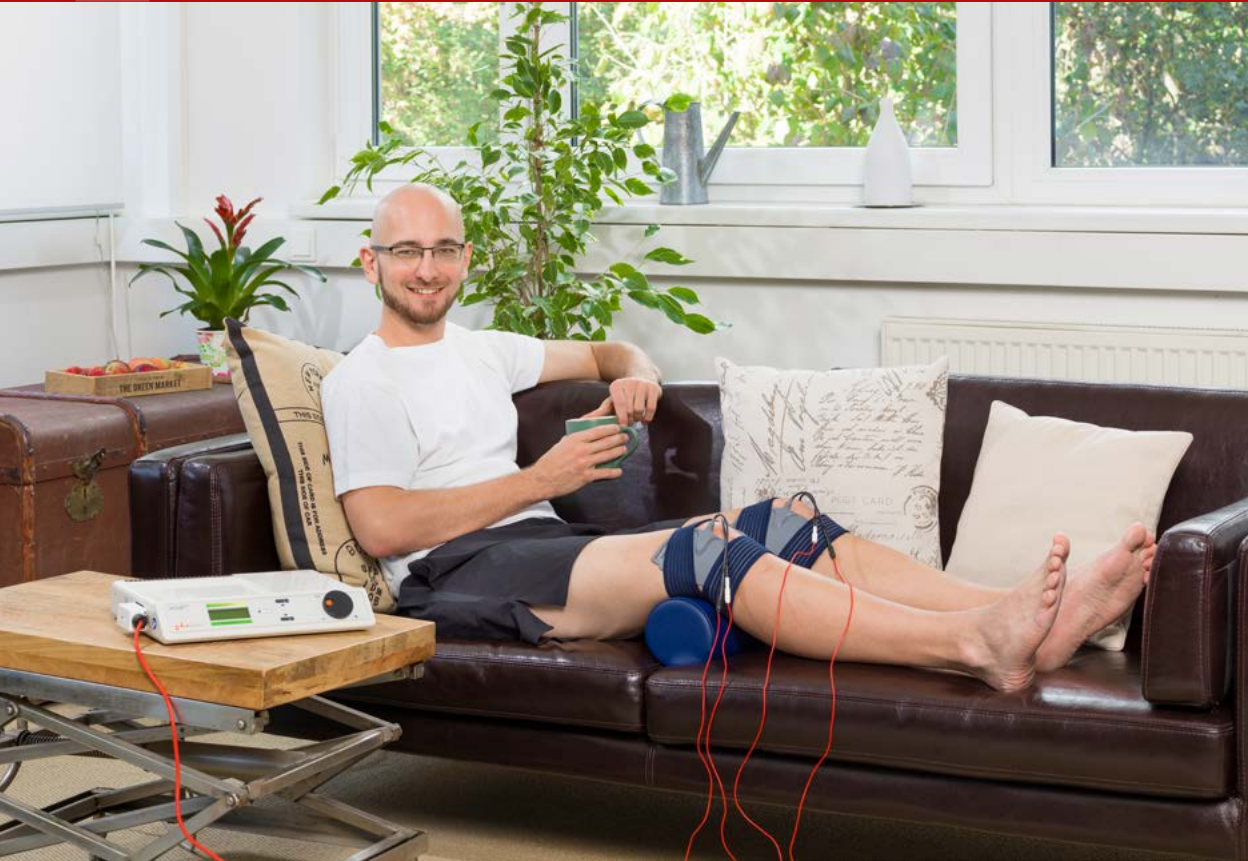

Ihr Schuhfried-Plus: Qualität und Kompetenz aus Österreich

Seit mehr als 70 Jahren sind wir in der Entwicklung und Bereitstellung von Medizintechnikprodukten in Österreich tätig, unser Know-How und unsere Erfahrung sind einzigartig. Die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Fachexperten und Betroffenen ist uns wichtig. Unser Ziel ist, ÄrztInnen und PatientInnen Geräte zur Verfügung zu stellen, auf die Sie sich verlassen können: praktisch, effizient und einfach zu bedienen. Unsere Motivation ist, PatientInnen in ihrer Genesung optimal zu unterstützen.



*Unsere Produktpalette bietet mehr!
Klassische Elektrostimulationsgeräte, die von Schuhfried
gefertigten STIMULETTEN, Therapieliegen, Robotik-Systeme
zur Rehabilitation, Hochtontherapie High-End Geräte, MoVeS-
Bänder in verschiedenen Stärken, Wellsystem-Oberwasser-
druckkreiselmassage, Gangschulungssysteme, Greif-
schulungssysteme, u.v.m.*

ELEKTROTHERAPIE
BRINGT'S



SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH
Van Swieten-Gasse 10, 1090 Wien
Tel +43 / 1 / 405 42 06 · Fax +43 / 1 / 405 44 64
info@schuhfriedmed.at · www.schuhfriedmed.at