



STIMULETTEN Stromformen für Stereodynator

Auszug aus den STIMULETTEN-Stromformen für den Ordner „Eigene Therapien“:

Stimulation denervierter Muskeln:

DEN 120 biphasisch rechteckig Einzelzuckungen in Serien 120ms Impulsbreite 400ms Impulspause 2Hz 8s on / 2s off

DEN 120 biphasisch dreieckig Einzelzuckungen in Serien 120ms Impulsbreite 400ms Impulspause 2Hz 8s on / 2s off

DEN 40 biphasisch rechteckig tetanische Kontraktionen 40ms Impulsbreite 10ms Impulspause 20Hz 4s on / 2s off

DEN40 biphasisch dreieckig tetanische Kontraktionen 40ms Impulsbreite 10ms Impulspause 20Hz 4s on / 2s off

Exponentialströme: Expo 100 biphasisch Dreieck, Expo 200 biphasisch Dreieck

Schwellströme zur Stimulation innervierter Muskeln:

aS biphasisch 65Hz 3,5s on/ 4,5s off

aSL biphasisch 50Hz 6s on/ 16s off

aSN biphasisch 30Hz 5s on/ 5s off

aSLL biphasisch 50Hz 10s on/ 50s off

Schmerzbehandlung: Impulsgalvanisatiopn IG 50 biphasisch, Ultrareizstrom Träbert UR biphasisch

Durchblutungsförderung: Impulsgalvanisatiopn IG 30 biphasisch