



Prim. Dr. Peter Biowski

Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation

(Rheumatologie)

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Severingasse 8/25


1090 Wien

Therapieplan für HiToP Metabol Ganzkörperanlage

Ganzkörperanlage:

Je eine große mit Kontaktspray gut befeuchtete Elektrode an den Unterarmen (Fingerstrecker) oder Handflächen und im Nacken – Anschluss weißer Stecker - mit Klettbindern an Armen fixieren, die Nackenelektrode wird am besten durch drauflegen (Rückenlage) fixiert.

Je eine große mit Kontaktspray gut befeuchtete Elektrode an den Fußsohlen – Anschluss schwarzer Stecker - mit Klettbindern fixieren.

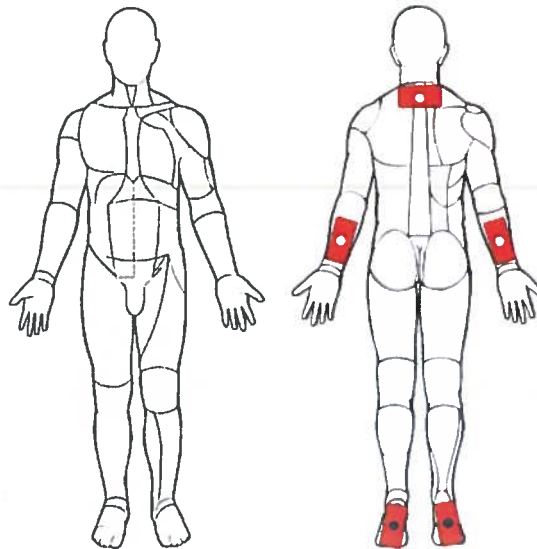

Stromdosierung:

Den Drehknopf solange im Uhrzeigersinn drehen bis ein angenehmes Kribbeln auftritt.

Stromstärke und Frequenz ändert sich automatisch.

Gerät läuft automatisch 60 Minuten.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

DR. PETER BIOWSKI
FA FÜR PHYSIKALISCHE MEDIZIN
RHEUMATOLOGIE
1090 SEVERING 8/25

Dr. Peter Biowski