



## Handanlage mit dem HiToP 191

*bei polyneuropathischen Beschwerden  
in den Händen und Fingern: Taubheit,  
Gefühlsstörung, motorischen Defiziten*



Standardvariante mit mitgeliefertem Zubehör.

Anlagetipp: Handschuhe vorformen und hineinschlupfen



Erleichterte Variante mit Sandsack, kein Klettband für die Hände notwendig, Finger können spielen.

Anlagetipp: Zum Einschalten eine Hand auf beide Elektroden legen, wenn das Kribbeln startet zweite Hand platzieren.  
Elektroden am Unterarm bitte ellbogennah auf dem Muskel und nicht über dem Handgelenk anbringen.

1. Elektrodenkabel (rot) anstecken: Die weißen Stecker sind für oben, die schwarzen für die Hände. Gerät mit dem Kippschalter einschalten.
2. Die schwarzen Seiten der Elektroden einsprühen und fixieren.
3. Intensität mit dem Drehregler bis zum angenehmen Kribbeln einstellen (Fingerspitze, Handballen...)  
Therapieempfehlung: 30 - 60 Minuten, 3 bis 7 Mal die Woche.

**Bei Herzschrittmacher darf nur einen Arm zur selben Zeit behandelt werden, also nur rechts oder links anlegen und dann wechseln.**

Dr. Peter Biowski,  
Facharzt für Physikalische Medizin und allg. Rehabilitation  
August 2020



**SCHUHFRIED**  
MEDIZINTECHNIK

Van Swieten-Gasse 10, A-1090 Wien  
info@schuhfriedmed.at · www.schuhfriedmed.at